

《斜视钩》产品使用说明书

一、概况

我公司生产的《斜视钩》由钩和柄部组成,可为单头或双头,采用 GB/T1220 —2007 中规定的 12Cr18Ni9 不锈钢材料或 GB/T3621 —2007 中规定的 TC4 钛合金材料制成。《斜视钩》设计合理使用可靠,具有良好的耐腐蚀性能,本器械经消毒灭菌后能够重复使用。

适用范围:《斜视钩》主要用于眼科手术时钩线和牵拉眼部组织。

二、性能

1. 斜视钩头部外表应圆滑,不得有锋棱、毛刺。
2. 斜视钩头部和圆柄应在同一条中心线上,不得有目力观察的偏斜。
3. 斜视钩圆柄的网纹滚花应清晰完整,不得有缺花、烂花。

三、产品型号、产品规格、产品材质、产品型式

产品型号、产品规格、产品材质、产品型式见附表。

四、器械规格/型号及器械材质的识别

器械型号由生产企业代号(“MR”表示)、产品分类代号、产品材质代号(“T”钛合金,“A”不锈钢)组成。

五、消毒

器械在手术前应按《医院消毒技术规范》进行灭菌处理,常规采用高压蒸汽消毒。

消毒方法推荐如下:消毒时间从压力蒸汽灭菌器达到要求温度时起

- a. 下排气式压力蒸汽灭菌器 121℃/102.8kPa~122.9kPa/≥20 分钟。
- b. 预真空或脉动式灭菌器 134℃/201.7kPa~229.3kPa/≥4 分钟。

本器械可放入专用的消毒盒内和其他器械一起消毒,也可每把器械单独消毒。

有条件的使用单位也可以使用环氧乙烷或低温等离子消毒。

六、维护保养

1. 手术结束后应及时将器械上残留的污渍冲洗干净,烘干备用。
2. 器械烘干后,要检查每把器械的正常使用功能,确保下次手术能正常使用。
3. 器械应存放在有软性材料作衬垫的包装盒内,防止器械间相互碰撞,以免损坏刃口及头部精细部位。

七、储存

1. 斜视钩应贮存在相对湿度不超过 80%,无腐蚀气体,通风良好的室内。
2. 斜视钩应存放在有软性材料作衬垫的容器内,以免碰坏。

八、注意事项

1. 本器械在使用过程中应轻拿轻放,避免发生碰撞。
2. 器械在清洁前和手术后都应放入多酶清洁剂中进行浸泡,一般浸泡时间为 5~25 分钟后再清洁,使残留在器械外表和机械衔接部位缝中的污物分化和软化后,再进行清洁和灭菌处理。

九、警示

1. 器械手术前必须进行消毒灭菌处理。
2. 使用前必须对器械进行检查,器械出现变形、破损、锈蚀、断裂时严禁使用。
3. 器械报废后的废弃物应按有关规定处置。
4. 器械不得与内窥镜配套使用。
5. 器械请按预期用途使用,不得超范围使用。
6. 生产日期:详见包装标签。
7. 使用期限:在正常使用与维护保养的情况下,使用期限为一年。

注册(生产)地址:苏州市吴中区郭巷街道谷盛路 99 号
电话:0512—65973197 传真:0512—65973599 邮编:215124
网址:<http://www.szmingren.com> 邮箱:szmingren@aliyun.com 2259511230@qq.com

苏州市协和医疗器械有限公司

说明书修订日期:2019 年 12 月

附表 斜视钩的产品型号、头部规格、器械材质、产品型式

序号	产品型号	头部规格	器械材质	产品型式
1	MR-S239	6 MM	12Cr18Ni9	圆
2	MR-S239-1	6 MM	12Cr18Ni9	弯
3	MR-0414	0.6MM 孔	12Cr18Ni9	球
4	MR-0414T		TC4	球
5	MR-0415	4mm~12mm	12Cr18Ni9	圆
6	MR-0415-1	7MM	12Cr18Ni9	扁
7	MR-0415-2	4mm~12mm	12Cr18Ni9	弯圆
8	MR-0420A	1.6mm	12Cr18Ni9	弯圆
9	MR-0421A	1.8mm	12Cr18Ni9	弯圆
10	MR-0422A	0.7mm	12Cr18Ni9	椭圆
11	MR-0423A	1.3mm	12Cr18Ni9	弯圆
12	MR-0424A	1.2mm	12Cr18Ni9	弯圆
13	MR-0425A	1.5mm	12Cr18Ni9	F 钩
14	MR-0426A	2.5mm	12Cr18Ni9	纯钩
15	MR-0427A	Φ0.6mm	12Cr18Ni9	圆
16	MR-0428A	Φ0.8mm	12Cr18Ni9	双钩
17	MR-0429A	1.75mm	12Cr18Ni9	带刻度
18	MR-0430A	7.3mm	12Cr18Ni9	圆板
19	MR-0431A	9.2mm	12Cr18Ni9	弯圆
20	MR-0432A	6mm	12Cr18Ni9	弯圆
21	MR-0414T-1	13mm	TC4	90°
22	MR-0420T	2.5MM	TC4	左槽
23	MR-0421T	2.5MM	TC4	右槽
24	MR-0422T	11.5MM	TC4	双头
25	MR-0423T-1	13MM	TC4	直纹
26	MR-0423T-2	11MM	TC4	直纹
27	MR-0423T-3	9MM	TC4	直纹
28	MR-0423T-4	5MM	TC4	圆