

《显微枪形麦粒钳》产品使用说明书

一、概况

《显微枪形麦粒钳》采用 GB/T1220—2007 中规定的 20Cr13、30Cr13 不锈钢料制成。本产品具有良好的耐腐蚀性能。本器械经消毒灭菌后能够重复使用。

二、适用范围

《显微枪形麦粒钳》主要用于显微手术时钳取组织或者器械。

三、产品型号、产品型式、头部规格、器械材质

型号	规格	型式	材质
MR-S260	直齿 6mm	枪型指环式	20Cr13、30Cr13

四、器械规格/型号及器械材质的识别

器械型号由生产企业代号（“MR”表示）、产品分类代号、产品材质代号（“T”钛合金，“A”不锈钢）组成。

五、消毒

器械在手术前应按医院的规定进行消毒处理，一般采用高压蒸汽消毒。

消毒时间从压力蒸汽灭菌器达到要求温度时起

- 下排气式压力蒸汽灭菌器 121℃/102.8kPa~122.9kPa/≥20 分钟。
- 预真空或脉动式灭菌器 134℃/201.7kPa~229.3kPa/≥4 分钟。

本器械可放入专用的消毒盒内和其他器械一起消毒，也可每把器械单独消毒。

有条件的使用单位也可以使用环氧乙烷或低温等离子消毒。

六、维护保养

- 手术结束后应及时将器械上残留的污渍冲洗干净，烘干备用。
- 器械烘干后，要检查每把器械的正常使用功能，确保下次手术能正常使用。

七、储存

- 器械应贮存在相对湿度不超过 80%，无腐蚀气体，通风良好的室内。
- 器械应存放在有软性材料作衬垫的包装盒内，防止器械间相互碰撞，以免损坏刃口及头部精细部位。

八、注意事项

- 本器械在使用过程中应轻拿轻放，避免发生碰撞。
- 器械在清洁前和手术后都应放入多酶清洁剂中进行浸泡，一般浸泡时间为 5~25 分钟后再清洁，使残留在器械外表和机械衔接部位缝中的污物分化和软化后，再进行清洁和灭菌处理。

九、警示

- 器械手术前必须进行消毒灭菌处理。
- 使用前必须对器械进行检查，器械出现变形、破损、锈蚀、断裂时严禁使用。
- 器械报废后的废弃物应按有关规定处置。
- 器械不得与内窥镜配套使用。
- 器械请按预期用途使用，不得超范围使用。
- 生产日期：详见包装标签。
- 使用期限：在正常使用与维护保养的情况下，使用期限为一年。

注册（生产）地址：苏州市吴中区郭巷谷盛路 99 号

电话：0512—65973197 传真：0512—65973599 邮编：215124

网址：<http://www.szmingren.com> 邮箱：szmingren@aliyun.com 2259511230@qq.com

苏州市协和医疗器械有限公司

说明书修订日期：2019 年 12 月