

《眼用显微持针钳》产品使用说明书

一、概况

我公司生产的《眼用显微持针钳》产品,采用 GB/T1220—2007 中规定的 20Cr13、30Cr13 不锈钢和 GB/T3621—2007 中规定的 TC4 钛合金材料,在显微镜下进行精密加工制成。本产品具有良好的耐腐蚀性能,经消毒灭菌后能够重复使用。

二、适用范围

《眼用显微持针钳》主要用于眼部手术时夹持缝针。

本器械可夹持的缝线针型号为 9-0/10-0/11-0,不建议超范围使用本器械。

夹持其他较粗型号缝线针时,请使用普通持针钳。

三、眼用显微持针钳型号/规格、型式及材质的识别及划分

器械型号由生产企业代号(“MR”表示)、产品分类代号、产品型号代号、产品材质代号(“T”钛合金,“A”不锈钢)、产品规格代号组成。

四、眼用显微持针钳的产品型号、产品型式、头部规格、器械材质

详见附表

五、消毒

器械在手术前应按《医院消毒技术规范》进行灭菌处理,常规采用高压蒸汽消毒。

消毒方法推荐如下:消毒时间从压力蒸汽灭菌器达到要求温度时起

- 下排气式压力蒸汽灭菌器 121℃/102.8kPa~122.9kPa≥20 分钟。
- 预真空或脉动式灭菌器 134℃/201.7kPa~229.3kPa≥4 分钟。

本器械可放入专用的消毒盒内和其他器械一起消毒,也可每把器械单独消毒。

有条件的使用单位也可以使用环氧乙烷或低温等离子消毒。

六、维护保养

- 手术结束后应及时将器械上残留的污渍冲洗干净,烘干备用。
- 器械烘干后,要检查每把器械的正常使用功能,确保下次手术能正常使用。

七、储存

器械应贮存在相对湿度不超过 80%,无腐蚀气体,通风良好的室内。

八、注意事项

- 器械在清洁前和手术后都应放入多酶清洁剂中进行浸泡,一般浸泡时间为 5~25 分钟后再清洁,使残留在器械外表和机械衔接部位缝中的污物分化和软化后,再进行清洁和灭菌处理。
- 器械应存放在有软性材料作衬垫的包装盒内,防止器械间相互碰撞,以免损坏刃口及头部精细部位。
- 消毒时请将器械放入眼科器械专用消毒盒内进行消毒,以免与其他器械发生碰撞。

九、警示

- 器械手术前必须进行消毒灭菌处理。
- 使用前必须对器械进行检查,器械出现变形、破损、锈蚀、断裂时严禁使用。
- 器械报废后的废弃物应按有关规定处置。
- 器械不得与内窥镜配套使用。
- 器械请按预期用途使用,不得超范围使用。
- 生产日期:详见包装标签。
- 使用期限:在正常使用与维护保养的情况下,使用期限为一年。

附表

眼用显微持针钳的产品型号、头部规格、产品材质、产品型式

序号	产品型号	规格	产品材质	产品型式
1	MR-H102T	130mm×6mm	TC4	弯头，扁柄
2	MR-H121T	Φ7×120mm×10mm	TC4	弯头，直纹一体式
3	MR-H121A	Φ7×127mm×10mm	20Cr13 或 30Cr13	弯头，直纹圆柄
4	MR-H121A-1	Φ7×127mm×10mm	20Cr13 或 30Cr13	弯头，一体式
5	MR-H121T-1	123mm×9mm	TC4	弯头，扁柄
6	MR-H121T-2	Φ7×134mm×9mm	TC4	弯头，网纹圆柄
7	MR-H121T-3	Φ8×134mm×10mm	TC4	弯头，多功能
8	MR-H121T-4	Φ7×110mm×9mm	TC4	弯头，网纹圆柄
9	MR-H121T-5	Φ8×134mm×10mm	TC4	弯头，网纹圆柄
10	MR-H121T-6	Φ8×140mm×12mm	TC4	弯头，网纹一体式
11	MR-H122A	Φ8×135mm×10mm	20Cr13 、 30Cr13 或 05Cr17Ni4Cu4Nb	弯头，网纹圆柄
12	MR-H122T	Φ8×135mm×10mm	TC4	直头锁扣
13	MR-H123A	Φ8×135mm×10mm	20Cr13 、 30Cr13 或 05Cr17Ni4Cu4Nb	弯头，网纹圆柄
14	MR-H123A-1	140mm×12mm	20Cr13 、 30Cr13 或 05Cr17Ni4Cu4Nb	弯头，扁柄锁扣
15	MR-H123T	Φ8×135mm×10mm	TC4	弯头锁扣
16	MR-H123T-1	145mm×12mm（硬质）	TC4	扁柄锁扣
17	MR-H123T-2	Φ7×115mm×7mm	TC4	弯头，直纹锁扣
18	MR-H124A	Φ8×135mm×10mm	20Cr13 、 30Cr13 或 05Cr17Ni4Cu4Nb	弯头，网纹圆柄
19	MR-H125A	130mm×20mm	20Cr13 、 30Cr13 或 05Cr17Ni4Cu4Nb	弯头，带剪刀
20	MR-H126A	145mm×12.5mm	20Cr13 、 30Cr13 或 05Cr17Ni4Cu4Nb	弯头，扁柄一体式