

《止血钳》产品使用说明书

一、概况

我公司生产的《止血钳》产品，采用 GB/T1220—2007 中规定的 20Cr13、30Cr13 不锈钢料制成。本产品
设计合理、使用可靠，具有良好的耐腐蚀性能。本器械经消毒灭菌后能够重复使用。

《止血钳》用于钳夹血管、分离组织以止血。

二、性能

1. 止血钳应对称，外表应无锋棱、毛刺、裂纹、颧角的锐边应倒钝。
2. 止血钳应有良好的弹性和牢固性。
3. 止血钳锁止牙全部锁合时，唇头齿应吻合，不得卡塞、偏歪现象；唇头齿应清晰，不应有缺齿、烂齿和毛刺；锁止牙应完整、无锋棱、毛刺。
4. 止血钳开闭应轻松灵活，摆动量应符合表 3 的规定。

三、止血钳型号/规格、型式及材质的识别及划分

序号	产品型号	规格	产品材质	备 注
1	MR-S246	125mm	20Cr13 或 30Cr13	弯形直齿指圈式
2	MR-S246-1	100mm		
3	MR-S246-2	140mm		
4	MR-S246-3	180mm		
5	MR-S246-4	160mm		
6	MR-S247	125mm	20Cr13 或 30Cr13	直形直齿指圈式
7	MR-S247-1	100mm		
8	MR-S247-2	140mm		
9	MR-S247-3	180mm		
10	MR-S247-4	160mm		

四、器械规格/型号及器械材质的识别

器械型号由生产企业代号（“MR”表示）、产品分类代号、产品材质代号（“T”钛合金，“A”不锈钢）组成。

五、消毒

器械在手术前应按《医院消毒技术规范》进行灭菌处理，常规采用高压蒸汽消毒。

消毒方法推荐如下：消毒时间从压力蒸汽灭菌器达到要求温度时起

a. 下排气式压力蒸汽灭菌器 121℃/102.8kPa~122.9kPa/≥20 分钟。

b. 预真空或脉动式灭菌器 134℃/201.7kPa~229.3kPa/≥4 分钟。

本器械可放入专用的消毒盒内和其他器械一起消毒，也可每把器械单独消毒。

六、维护保养

1. 手术结束后应及时将器械上残留的污渍冲洗干净，烘干备用。
2. 器械烘干后，要检查每把器械的正常使用功能，确保下次手术能正常使用。

七、储存

1. 器械应贮存在相对湿度不超过 80%，无腐蚀气体，通风良好的室内。
2. 器械应存放在有软性材料作衬垫的包装盒内，防止器械间相互碰撞，以免损坏刃口及头部精细部位。

八、注意事项

1. 器械在清洁前和手术后都应放入多酶清洁剂中进行浸泡，一般浸泡时间为 5~25 分钟后再清洁，使残留在器械外表和机械衔接部位缝中的污物分化和软化后，再进行清洁和灭菌处理。
2. 眼科手术器械为精细器械，在发放、清洗、消毒和使用时应轻拿轻放，避免发生碰撞。
3. 请勿将器械浸入生理盐水中，以免引起锈蚀。
4. 首次使用前请去油后，再进行清洗消毒。
5. 若用于夹持动脉等较粗、风险较高的血管时请选用其他专用钳。

九、警示

1. 器械手术前必须进行消毒灭菌处理。
2. 使用前必须对器械进行检查，器械出现变形、破损、锈蚀、断裂时严禁使用。
3. 器械报废后的废弃物应按有关规定处置。
4. 器械不得与内窥镜配套使用。
5. 生产日期：详见包装标签。
6. 使用期限：在正常使用与维护保养的情况下，使用期限为一年。

注册（生产）地址：苏州市吴中区郭巷街道谷盛路 99 号

电话：0512—65973197 传真：0512—65973599 邮编：215124

网址：<http://www.szmingren.com> 邮箱：szmingren@aliyun.com 2259511230@qq.com

苏州市协和医疗器械有限公司

说明书编制日期：2019 年 12 月