

《消毒盒》产品使用说明书

一、概况

我公司生产的《消毒盒》产品采用 GB1220 中规定的医用级不锈钢板材和医用级耐高温塑料制成。不锈钢板材消毒盒经冲孔、折弯，表面光滑无毛刺；医用级耐高温塑料消毒盒经注压制成；本产品盒盖、底部采用空中槽（孔）设计以防结水，底部用带齿硅胶作衬垫有效的防止了器械间的相互碰撞。本产品设计合理，具有良好的耐腐蚀性能；本产品可存放多种不同形状、不同种类的手术器械一起消毒，能满足医院对各种手术器械消毒的需求。

二、规格

（消毒盒的型号、规格、材质、形式）见下表：

序	型号	规格 (mm)	材质	形式	序	型号	规格 (mm)	材质	形式
1	MR-O622	Φ102×49	不锈钢	圆型	10	MR-O632	200×110×45	耐高温塑料	单层
2	MR-O623-1	250×150×30	不锈钢	双层	11	MR-O633	265×162×45	耐高温塑料	单层
3	MR-O624	255×200×46	不锈钢	单层	12	MR-O634	265×162×45	耐高温塑料	双层
4	MR-O625	210×125×18	耐高温塑料	单层	13	MR-O635	192×58×27	耐高温塑料	单层
5	MR-O627	200×110×27	耐高温塑料	单层	14	MR-O635-1	192×58×27	耐高温塑料	槽形垫
6	MR-O628	153×89×27	耐高温塑料	单层	15	MR-O636	285×180×45	耐高温塑料	圆形
7	MR-O629	250×150×27	耐高温塑料	单层	16	MR-O637	200×110×27	耐高温塑料	单层
8	MR-O630	265×162×27	耐高温塑料	单层	17	MR-O638	198×72×27	耐高温塑料	单层
9	MR-O631	200×110×45	耐高温塑料	单层	18	MR-O413T-4H	1×5	聚四氟乙烯	虹膜拉钩专用
					19	MR-O413T-5H	1×5	聚四氟乙烯	囊袋拉钩专用

三、使用方法

将已清洗干净的器械放入消毒盒硅胶垫内，器械间由硅胶垫上的齿作隔离。（可根据器械件的数量选择不同规格的消毒盒）

四、适用的消毒方法

- 1、不锈钢消毒盒适用所有的消毒方法；
- 2、耐高温塑料消毒盒适用的消毒方法为：**137℃**以下、**2**个大气压的高压蒸汽灭菌器。
- 3、**聚四氟乙烯消毒盒**适用的消毒方法为：**环氧乙烷消毒**或**低温等离子消毒**。

五、维护保养

消毒结束后应及时将消毒盒上残留的污渍冲洗干净，烘干备用。

六、储存

消毒盒应贮存在相对湿度不超过 80%，无腐蚀气体，通风良好的室内。

七、注意事项

- 1、根据消毒方法选择适用其方法的消毒盒。
- 2、消毒盒发生变形或破损、锈蚀、断裂时严禁使用。
- 3、报废的消毒盒按国家的有关规定处置。
- 4、生产日期：详见包装标签
- 5、使用期限：在正常使用与维护保养的情况下，使用期限为一年。
- 6、**耐高温塑料消毒盒**不建议在瞬间温度有可能会超过 137℃，气压会超过 2 个大气压的灭菌设备中使用。如果使用，会缩短耐高温塑料消毒盒的使用寿命。

注册（生产）地址：苏州市吴中区郭巷街道谷盛路 99 号
电话：0512—65973197 传真：0512—65973599 邮编：215124
网址：<http://www.szmingren.com> 邮箱：szmingren@aliyun.com 2259511230@qq.com

苏 州 市 协 和 医 疗 器 械 有 限 公 司

说明书修订日期：2019 年 06 月