

《眼罩》产品使用说明书

一、概况

为了满足医院开展各种眼科手术后的护理需求，使手术达到预期的效果。我厂在眼科专家教授的指导帮助下，研制开发眼科用护眼罩；该产品按 YZB/苏(苏)0398-2010《眼罩》标准组织生产。

该产品主要供眼科手术后短期固定于包扎创口的纱布表面防止创口受外在重力的伤害及阻挡光线、辐射、风吹、沙尘、细菌等入侵用。

二、性能

眼罩的外表面及孔径内壁应圆滑，不得有锋棱、毛刺、裂纹的缺陷。

三、规格(见表 1)

表 1 眼罩型号、规格、材料

序号	型号	规格	材料	备注
1	MR-O621	白色 A 型	医用聚丙烯	/
2	MR-O621-1	透明	医用聚丙烯	带粘贴条
3	MR-O621-2	白色 B 型	医用聚丙烯	/
4	MR-O621-3	透明	医用聚丙烯	带固定线
5	MR-O620	透明 A 型	医用聚丙烯	8 孔
6	MR-O620-1	透明 A 型	医用聚丙烯	9 孔
7	MR-O620-2	透明 B 型	医用聚丙烯	11 孔
8	MR-O620-3	透明 B 型	医用聚丙烯	13 孔
9	MR-O520-1	儿童用	Y2 硬质铝板	/
10	MR-O520-2	成人用	Y2 硬质铝板	/
11	MR-O520X	儿童用	医用聚丙烯	透明
12	MR-O520D	儿童用	医用聚丙烯	透明
13	MR-O618	测量用	医用聚丙烯	/
14	MR-O619	测量用	铜版纸	
15	MR-O601	小	302/304 不锈钢	
16	MR-O602	中	302/304 不锈钢	
17	MR-O603	大	302/304 不锈钢	

四、消毒

眼罩在使用前应按医院的规定进行消毒处理，医用聚丙烯材料、铜版纸制成的眼罩建议采用环氧乙烷消毒方法进行消毒处理。Y2 硬质铝板、302/304 不锈钢制成的眼罩建议采用高压蒸汽消毒。

五、储存

眼罩应贮存在相对湿度不超过 80%，无腐蚀气体，通风良好的室内。

六、注意事项

- 1.眼罩以非灭菌形式提供销售。
- 2.眼罩在使用前应检查其使用功能。

七、警示

- 1.眼罩使用前必须进行消毒处理。
- 2.眼罩发生变形或破损、断裂时严禁使用。
- 3.眼罩报废后的废弃物应按有关规定处置。
- 4.眼罩的使用期限为 1 次/人。

注册（生产）地址：苏州市吴中区郭巷街道谷盛路 99 号

电话：0512—65973197 传真：0512—65973599 邮编：215124

网址：<http://www.szmingren.com> 邮箱：szmingren@aliyun.com 2259511230@qq.com

苏州市协和医疗器械有限公司

说明书编制日期：2019 年 06 月